

1.0.AMAÇ: Kan grubu bakma işleminin nasıl yapılacağını tanımlamak.

2.0.KAPSAM: Transfüzyon Merkezi çalışanlarını kapsar

3.0.KISALTMALAR:

4.0.TANIMLAR:

5.0.SORUMLULAR: Transfüzyon Merkezi sorumlu hekimi,Transfüzyon Merkezi sorumlu teknikeri

6.0.UYGULAMA:

Kan grubu tüp metoduyla bakılır.

Hastadan K3EDTAlı kan örneği 500 ml. Dilüent (sf) 50 ml. Eritrosit koyularak süspanse edilir.

Daha sonra 3 tüpe Ani-A, Anti-B ve Anti-D antijenleri ikişer damla damlatılır.

Antijen damlatılan tüplere 50 ml hazırlanan Eritrosit süspanسیون damlatılır.

2500 devirde 10dk santifirüj edilerek değerlendirmeye alınır.

Gerekli durumlarda zayıf d çalışılır.

Jel santrifügasyon yöntemi için kan grubu obg forward and reverse grouping Sip'ine bakınız.

7.0. İLGİLİ DOKÜMANLAR:

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Transfüzyon Sorumlu Hekimi	Kalite Yönetim Direktörü	Mesul Müdür